

## Zacházení s produkty Weinmann při podezření na kontaminaci vysoce infekční nákazou

Vzhledem k současné globální situaci a diskuzím o tom, jak se vypořádat s nedávno objeveným koronavirem (Sars-Cov-2), bychom vás rádi ujistili, že při patřičné přípravě a používání našich produktů je poměrně nízké riziko přenosu infekcí.

Nicméně při podezření kontaktu s pacientem trpícím vysoce infekčním onemocněním prosím zvažte při manipulaci s produkty Weinmann následující aspekty:

- Přednostně používejte komponenty pro jedno použití (dýchací trubice, průtoková čidla, odsávací katétr, elektrody atd.).
- Použité jednorázové materiály řádně likvidujte (při provádění tohoto kroku věnujte pozornost vlastní ochraně).
- Pro ochranu pacienta i personálu používejte filtr dýchacího systému (např. WM 22162) k oddělení virů a bakterií od patientského ventilu a pacienta po celou dobu ventilace.
- Obvykle, riziko kontaminace vnitřku přístroje přítokem okolního vzduchu (funkce AirMix) je **klasifikováno jako nízké**. Pro další snížení rizika kontaminace doporučujeme používat hygienický filtr pro přístroje MEDUMAT Transport, MEDUMAT Standard2 či MEDUVENT Standard.
- Vyměňte hygienický filtr po (podezření) kontaktu s nakaženým pacientem při použití ventilátoru s funkcí AirMix (FiO<sub>2</sub><1).
- Pokud je to možné, používejte ventilátory Weinmann, které nemají hygienický filtr, pouze se 100 % kyslíkem nebo používejte přístroj bez funkce Air Mix (např. MEDUMAT Easy CPR).
- Po použití provádějte řádnou hygienickou údržbu přístroje a znovupoužitelného příslušenství, jak je popsáno v návodu k použití.
- Desinfekci otřením lze alternativně provést pomocí desinfekčních ubrousků Oxywipes S na bázi peroxidu vodíku od společnosti Ecolab namísto doporučeného Terralin Protect.
- Při hygienické údržbě zvažte prosím dobu aplikace použitého desinfekčního produktu.
- Pokud zasíláte přístroje do společnosti Weinmann či jiné servisní společnosti na servis, ujistěte se, že přístroj i příslušenství jsou před odesláním řádně desinfikovány.

Hamburk, 23. 3. 2020

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG