

Přístroj pomocí zeleného odškrtnutí udává, zda je zadaný kód volby správný, a zabarví volbu podle výše uvedené barevné škály.


Přitom dodržujte následující:

- Předpoklad pro uvolnění volby Křivkové zobrazení: Je uvolněna volba Měření průtoku + ASB.
 - Předpoklad pro uvolnění volby Tlakově řízené ventilační režimy: Jsou uvolněny volba Měření průtoku + ASB a volba Křivkové zobrazení.
7. Stisknutím navigačního knoflíku **ok** opustit menu zadávání kódu.
 8. Pravým navigačním knoflíkem aktivovat nebo deaktivovat volbu.
 9. Pro opuštění menu obsluhy stisknout navigační knoflík **zpět**.


Výsledek Volba je uvolněna pro užití a aktivována.

4.15 Aktualizace softwaru

- Předpoklad*
- Přístroj je připojen k napájecí elektrické síti.
 - V přístroji je nasazena plně nabitá baterie.
 - Je vyvoláno menu obsluhy (viz „6.1 Navigování v menu obsluhy“, strana 119).
1. Je-li to zapotřebí: Software z oblasti přihlášení domovské stránky WEINMANN Emergency zavést na SD kartu.
 2. Jestliže je software k dispozici jako soubor ZIP: Rozbalit software.
Software je ve složce jako soubor s označením **WM28981-x.x.hex**.

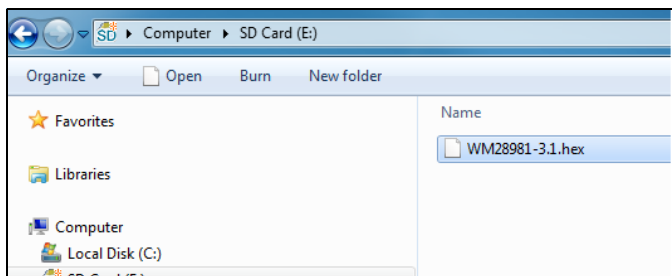

3. Uložit soubor do kořenového adresáře SD karty.
Přitom dodržujte následující: Soubor pro aktualizaci softwaru nesmí být v podsložce.
4. Zvolit položku menu **Aktualizace softwaru**.

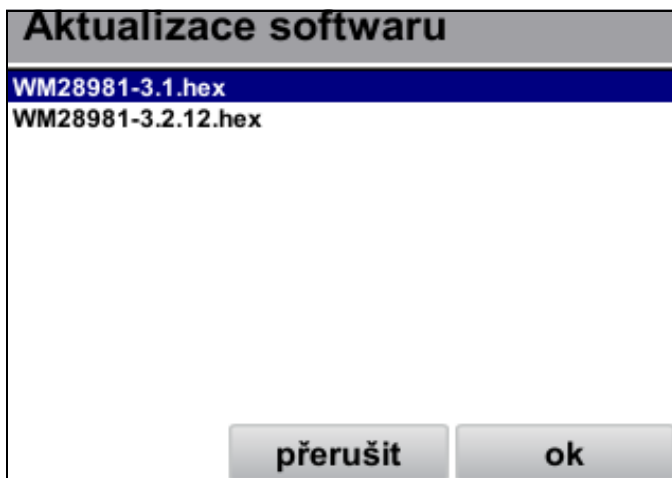

5. Zvolit aktualizaci softwaru.

OZNÁMENÍ


Věcná škoda v důsledku pohybování přístrojem a/nebo tisknutí tlačítek během procesu aktualizace!

Pohybování přístrojem a/nebo tisknutí tlačítek během procesu aktualizace může přerušit proces aktualizace a poškodit přístroj.

⇒ Nepohybovat přístrojem.

⇒ Netisknout žádné tlačítko na přístroji.

6. Stisknutím navigačního knoflíku **ok** zahájit aktualizaci softwaru.
Přístroj aktualizuje software.

7. Po dokončení aktualizace: Stisknout navigační knoflík **reboot**, aby se přístroj restartoval.
Přístroj se restartuje a na displeji se objeví startovací menu.
8. Provést kontrolu funkce (viz „9.3 Provedení kontroly funkce“, strana 190).
9. Tlačítko zap./vyp.  držet stisknuté po dobu minimálně 2 sekund, aby se přístroj vypnul a nastavení uložila do paměti.

Výsledek Software je aktualizovaný.

Ihned po ukončení prováděné aktualizace softwaru se soubor **update.txt** uloží na SD kartu, která je v přístroji. Soubor obsahuje informace k aktuálně prováděné aktualizaci softwaru. Tyto informace Vám pomohou při dokumentaci v rámci Vašeho řízení jakosti. Soubor můžete pomocí textového editoru otevřít i vytisknout a podepsat. Následující informace najdete v souboru:

```
Softwareupdate durchgeführt / software update performed:
Datum / date: 2013-07-10 18:20:10
Seriennummer / serial number: 109
Updatedatei / update file: xxxxx.hex

Unterschrift / signature:
```

4.16 První propojení externího systému dokumentace údajů s přístrojem (přes přenos dat Bluetooth®)

4.16.1 Propojení v menu obsluhy

- Předpoklad*
- Externí systém dokumentace údajů podporuje komunikační protokol přístroje.
 - Volba **Přenos dat Bluetooth®** je v menu obsluhy přístroje uvolněná a aktivovaná (viz „4.14 Uvolnění volby“, strana 99).
 - Menu obsluhy je otevřené.
1. Zvolit pole **Informace o přístroji**.
Zobrazí se Bluetooth® název přístroje.