

Rozšíření kontroly funkce

U přístrojů se softwarem od verze 4.15 se kontrola funkce odlišuje od popisu v aktuálním návodu k použití.

OZNÁMENÍ

Věcné škody v důsledku dotyku kontaktů v přihrádce pro baterii!


Dotyk kontaktů nebo vnikající tekutiny mohou přístroj poškodit.

- ⇒ Přístroj používejte pouze s vloženou baterií.
- ⇒ Nedotýkat se kontaktů v přihrádce pro baterii.
- ⇒ Opatrně čistit přihrádku pro baterii, aby se do přístroje nedostaly žádné tekutiny.

Aby se zajistilo, že se přístroj spolehlivě spustí i z bateriového provozu, rozšiřuje se kontrola funkce přístroje MEDUMAT Standard² o tyto body:

- Odpojit přístroj od napájecí sítě.
- Zapnout přístroj a provést kontrolu funkce, jak je popsáno v návodu k použití.

Když se přístroj zapíná s připojenou napájecí sítí, kontrola funkce se nemůže spustit. Na displeji přístroje se objeví tato zpráva:

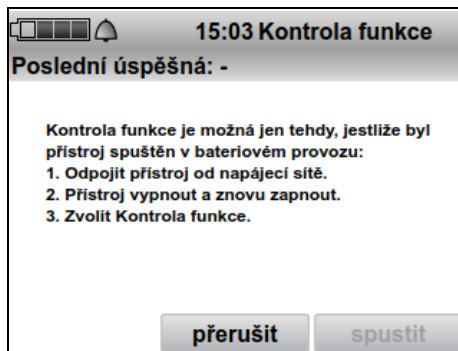

- Pro provedení kontroly funkce postupujte podle pokynů na displeji.