


## 8. Menu obsluhy (Operator menu)

V menu obsluhy máte možnost přístroj optimálně nastavit na příslušné podmínky použití. Menu obsluhy lze během spouštění přístroje vyvolat následovně.

1. Zapněte přístroj.
2. Pak současně stiskněte obě dolní funkční tlačítka závislá na kontextu (viz obrázek vlevo).

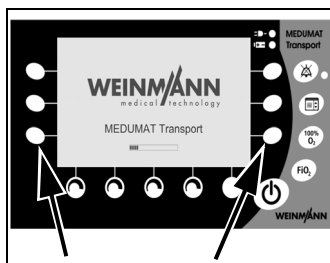

Když postupový pruh zmodrá, jste v nabídce Operator menu (menu obsluhy). Jakmile je dokončen proces zavádění, objeví se spouštěcí obrazovka menu obsluhy.

Jestliže postupový pruh nezmodrá, přístroj znovu zcela vypněte a opět zapněte. Pak znovu stiskněte obě funkční tlačítka.


### Navigování v menu obsluhy

K navigování v menu obsluhy můžete použít buď navigační knoflík, nebo funkční tlačítka závislá na kontextu na pravé straně displeje (viz „5.3 Navigace v menu“ na straně 43).

#### Upozornění:


Podle modrého zbarvení (modrý volicí pruh) příslušného pole poznáte, na kterém místě v menu obsluhy se právě nacházíte. Výchozí poloha modrého volicího pruhu je v menu obsluhy vždy střední pole nahoře v řádku menu (zde: Scroll: Page 1).

V řádku menu se Vám mimoto ukáže název příslušné stránky v angličtině (pole vlevo, které má hnědě pozadí, zde: Password Page (stránka hesla)).

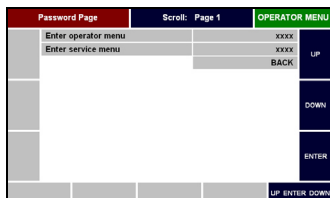

1. Pro vyvolání stránky menu obsluhy otáčejte navigačním knoflíkem, dokud se nezobrazí požadovaná stránka.
2. Stiskněte navigační knoflík.  
Pozadí první položky menu zvolené stránky zmodrá.
3. Pro vyvolání položky menu na stránce otáčejte navigačním knoflíkem, dokud se volicí pruh nebude nacházet na požadované položce menu.
4. Stiskněte navigační knoflík.  
Pozadí požadované položky menu zezelená.
5. Chcete-li změnit některou hodnotu, otáčejte navigačním knoflíkem, dokud se nezobrazí požadovaná hodnota.
6. Stiskněte navigační knoflík.  
Pozadí změněné hodnoty zmodrá a hodnota se uloží do paměti.  
  
Na některých stránkách menu obsluhy jsou k dispozici další funkce. Tyto funkce jsou nutné pro jednotlivé kroky nastavení přístroje a jsou popsány na příslušných místech této kapitoly.
7. Chcete-li zvolenou stránku opustit, otáčejte navigačním knoflíkem, dokud se volicí pruh nebude nacházet na hodnotě BACK (ZPĚT).
8. Stiskněte navigační knoflík.  
Nyní můžete vyvolat jinou stránku menu obsluhy.
9. Chcete-li menu obsluhy opustit, držte tlačítko zap./standby/vyp. stisknuté tak dlouho, dokud LED kontrolka alarmu nepřestane blikat.  
Přístroj je vypnutý.

# MEDUMAT Transport Menu obsluhy

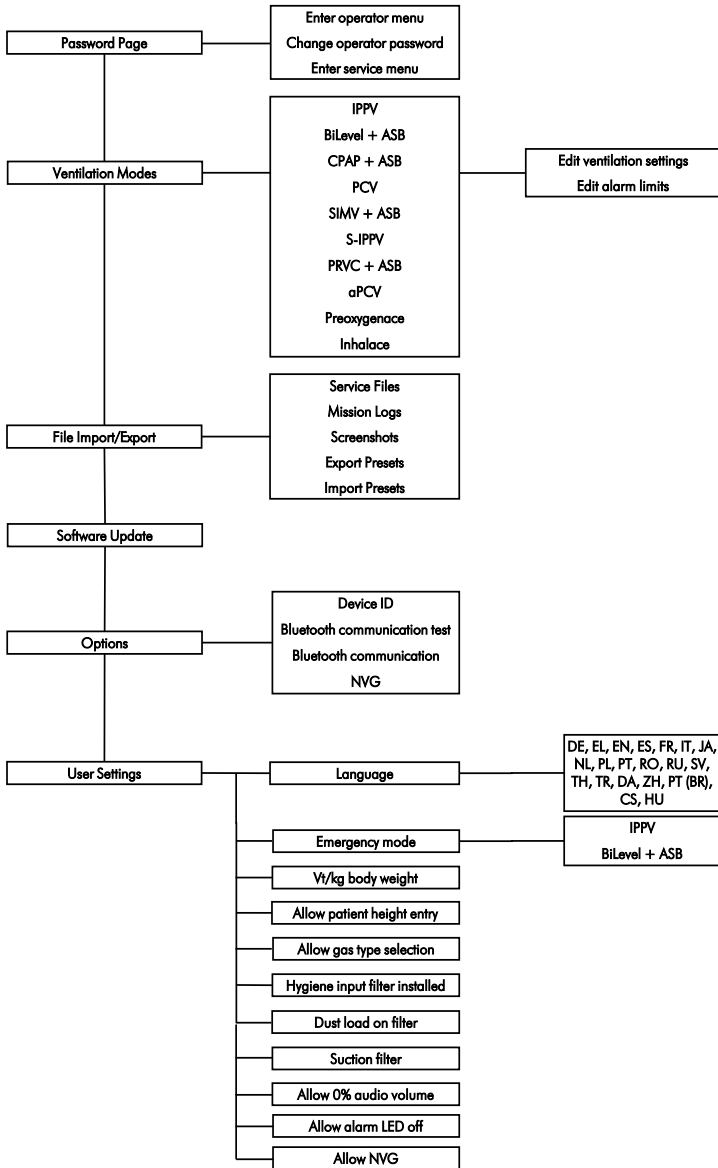

## 8.4 Software Update (aktualizace softwaru)



V tomto menu můžete do přístroje zavést aktuální verzi softwaru.

Při instalaci aktuální verze softwaru postupujte takto:

1. Zaveďte aktuální verzi softwaru na USB disk.

### Pozor!

Připojujte k USB rozhraní jen USB disky splňující standard USB 2.0. Jinak může být narušen provoz přístroje, a tím může být ohrožen pacient.

### Upozornění:

Zajistěte, aby byla baterie přístroje MEDUMAT Transport minimálně na 50 % nabitá nebo aby byl přístroj připojen k napájecímu zdroji. Jinak se aktualizace nespustí a objeví se hlášení: „Battery capacity < 50 %! To perform an update, please connect device to power supply.“ (Kapacita baterie < 50 %! Pro provedení aktualizace prosím připojte přístroj k napájecímu zdroji) Doporučujeme Vám, abyste vždy před prováděním aktualizace připojili přístroj k napájecímu zdroji.

2. Zapněte přístroj.
3. Do USB rozhraní přístroje zasuňte USB disk.
4. V menu obsluhy vyberte stránku „Software Update“.

### Upozornění:

Může krátkou chvíli trvat, než přístroj MEDUMAT Transport rozpozná USB disk.

Během aktualizace softwaru nechte USB disk zasu nutý v USB rozhraní přístroje. Vyjměte jej teprve tehdy, když je aktualizace softwaru úplně dokončena.

5. Stisknutím tlačítka  nebo navigačního knoflíku spusťte instalaci nové verze softwaru na přístroji.

6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

**Upozornění:**

Instalace verze softwaru s číslem verze nižším, než je na přístroji, není možná.

Pokud by přístroj nedokázal přečíst soubor s aktualizací softwaru, může to mít tyto důvody:

- Soubor s aktualizací softwaru nebo USB disk je poškozený. V obou případech se na displeji objeví hlášení: „Update FAILED, wrong checksum, please verify file“. (NEÚSPĚŠNÁ aktualizace, nesprávný kontrolní součet, prosím ověřte soubor) V takovém případě použijte jiný USB disk nebo znovu zkopírujte soubor s aktualizací softwaru na USB disk.
- Aktualizace softwaru se přerušila a objeví se hlášení: „Update FAILED, please try again.“ (NEÚSPĚŠNÁ aktualizace, prosím zkuste to znovu). V tomto případě spusťte ještě jednou proces aktualizace, **aniž** byste přístroj vypnuli.

Jestliže přístroj dokázal správně načíst soubor s aktualizací softwaru, bude starý software nahrazen novým a na displeji se objeví postupový pruh. Na konci procesu aktualizace se objeví hlášení: „Update successful, please switch off the device.“ (Úspěšná aktualizace, prosím vypněte přístroj.)

7. Aby se aktualizovala nová verze softwaru, vypněte nejprve přístroj.
8. Vyměňte USB disk z přístroje.
9. Zapněte přístroj.
10. V menu „Data přístroje“ (viz „Data přístroje“ na straně 93) zkontrolujte uvedenou verzi softwaru.
11. Proveďte kontrolu funkce (viz „10. Kontrola funkce“ na straně 115).