

MEDUMAT Standard²

Ventilátor

Bezpečnostní pokyny

Doplněk k návodu k použití



Toto je doplněk k návodu k použití. Před použitím výrobku si prosím přečtěte tyto bezpečnostní informace společně s návodem k použití. Nedodržení zde uvedených informací může vést k vážným zraněním nebo dokonce ke smrti.

Bezpečnostní pokyny

Tyto bezpečnostní informace doplňují kapitolu „Bezpečnostní pokyny“ v návodu k použití přístroje. Vždy dodržujte také pokyny uvedené v návodu k použití. Návod k použití a tento dodatek naleznete na adrese: www.weinmann-emergency.com.

Varování **Riziko narušení léčby nebo selhání léčby v důsledku netěsností nebo odpojení během ventilace!**

Úniky během ventilace mohou snížit aplikovaný dechový objem nebo tlak v dýchacích cestách. Dojde-li k závažnému úniku nebo k odpojení pacienta od přístroje, nelze pacienta ventilovat. To může vést k závažnému nebo život ohrožujícímu zranění pacienta.

- Používejte vhodné monitorování (etCO₂, SpO₂ nebo měření výdechového objemu MVe).
- Okamžitě reagujte na alarmy a poruchy, které signalizují úniky nebo odpojení (tlak v dýchacích cestách ↓, MVe ↓, únik na straně pacienta (v režimu CCSV)).
- Zkontrolujte, zda je maska nebo dýchací pomůcka správně umístěna.
- Zkontrolujte, zda nejsou odpojeny všechny spoje dýchacího okruhu mezi přístrojem a pacientem.

Výrobce

WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH
Frohbösestraße 12
22525 Hamburg
NĚMECKO
T: +49 40 88 18 96-0
E: customerservice@weinmann-emt.de

Centrum výroby, logistiky, servisu

WEINMANN Emergency
Medical Technology GmbH
Siebenstücken 14
24558 Henstedt-Ulzburg
NĚMECKO