


- **Importovat konfiguraci**  
Přístroj importuje konfiguraci z SD karty a přebere konfiguraci.
- **Exportovat data záznamu akce**  
Přístroj zkopíruje interně uložené data záznamu akce na SD kartu (viz „16.10.3 Zaznamenaná data záznamu akce“, strana 233).

*Výsledek* Data byla importována/exportována. Přístroj označí provedenou akci zeleným zatržítkem .

## 9.8 Aktualizace softwaru

### 9.8.1 Provedení aktualizace softwaru

*Předpoklad*

- Přístroj je připojen k síťovému napájení.
- Menu obsluhy bylo aktivováno (viz „9.1 Aktivace menu obsluhy“, strana 141).

#### UPOZORNĚNÍ

#### Materiální škody v důsledku poruch během procesu aktualizace softwaru přístroje!

Přemístění přístroje nebo stisknutí tlačítek během aktualizace může proces aktualizace přerušit a poškodit přístroj.


- ⇒ Během procesu aktualizace nevypínejte přístroj.
- ⇒ Během procesu aktualizace neodpojujte přístroj od sítě.
- ⇒ Během procesu aktualizace nepohybujte přístrojem.
- ⇒ Během procesu aktualizace nesmíte na přístroji stisknout žádná tlačítka.
- ⇒ Během procesu aktualizace nevyjímejte SD kartu.

1. Pokud je software k dispozici jako ZIP soubor: Rozbalte ZIP soubor. V rozbalené složce je uložen software ve formě souboru s názvem **WM#####-x.x.hex**. Název souboru hex odpovídá číslu softwaru a verzi softwaru.
2. Uložte soubor na SD kartu.  
Přitom dodržujte: Soubor aktualizace softwaru nesmí být ve složce.
3. Vložte SD kartu (viz „4.5.1 Vložení SD karty“, strana 62).

4. V menu obsluhy vyberte bod menu **Aktualizace softwaru**. Zobrazí se soubory, které jsou uloženy na SD kartě.



5. Pomocí navigačního ovladače vyberte poslední verzi softwaru **WM####-x.x.hex**.
6. Stisknutím navigačního ovladače spustíte aktualizaci softwaru. Přístroj provádí aktualizaci softwaru v několika krocích. Po dokončení procesu se na displeji zobrazí hlášení **SUCCESS**.

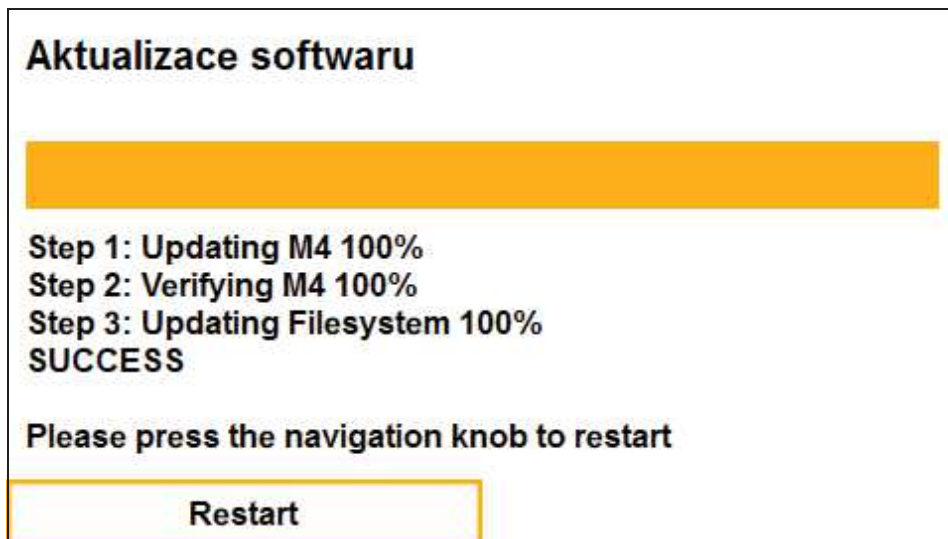

7. Stisknutím navigačního ovladače restartujte přístroj. Přístroj se restartuje. Na displeji se zobrazí úvodní menu.
8. Proveďte kontrolu funkce (viz „5 Kontrola funkce“, strana 66).

*Výsledek* Provedli jste aktualizaci softwaru.

Po aktualizaci jsou informace o aktualizaci softwaru uloženy do souboru update.txt na SD kartě. Soubor můžete otevřít v textovém programu a také vytisknout a podepsat.

```
Softwareupdate durchgeführt / software update performed:
Datum / date: 2019-05-15 21:30:37
Seriennummer / serial number: 89
Updatedatei / update file: WM35756-X.XX.hex

Unterschrift / signature:
```

## 9.9 Informace o přístroji

Parametry		Popis
Výrobní čísla	Přístroj	Zde lze zjistit výrobní číslo přístroje. Toto číslo je uvedeno také na štítku přístroje.
	Základní deska	Zde lze zjistit výrobní číslo základní desky.
	Ventilátor	Zde lze zjistit výrobní číslo ventilátoru.
ID přístroje	ID přístroje	Zde lze zjistit ID přístroje. To je nutné pro získání volitelných funkcí.
Počítadlo	Počet dní do kontroly přístroje	Zde lze zjistit zbývající dny do příští naplánované kontroly přístroje.
	Počet dní do údržby	Zde lze zjistit zbývající dny do příští naplánované údržby přístroje.
	Poslední úspěšná kontrola funkce	Zde lze zjistit čas poslední úspěšně provedené kontroly funkce.
Číslo verze	Verze software	Zde lze zjistit, jaká verze softwaru je v přístroji nainstalována.