

Popis přístroje a návod k použití

STATION MEDUMAT



Držák pro ventilátor MEDUMAT

Přenosný držák STATION MEDUMAT WM 22950

Držák na stěnu STATION MEDUMAT WM 22550

OBSAH

1	Popis přístroje	3
1.1	Použití	3
1.2	Funkce	3
2	Bezpečnostní instrukce	3
3	Montáž	4
4	Obsluha	4
5	Hygienická údržba	5
6	Kontrola funkce	5
6.1	Kontrola západky	5
6.2	Kontrola svorky	5
7	Údržba	6
8	Likvidace	6
9	Opravy	6
10	Rozsah dodávky	7
10.1	Standardní rozsah dodávky	7
10.2	Příslušenství	7
9	Technické údaje	7
10	Záruka	8

1 POPIS PŘÍSTROJE

1.1 Použití

Přenosný držák STATION MEDUMAT WM 22950

Přenosný držák STATION MEDUMAT je určen pro ventilátory MEDUMAT.

- Slouží pro usazení MEDUMAT Standard, MEDUMAT Standard a, MEDUMAT Basic, MEDUMAT Basic p.
- Pomocí madla nebo ramenního popruhu může být přenášen.
- Pomocí svorky může být zavěšen na nosítka nebo postel; pomocí pásků na suchý zip lze zajistit proti pádu.
- Nesmí se používat v jedoucích vozech.

Držák na stěnu STATION MEDUMAT WM 22550

Držák na stěnu STATION MEDUMAT je určen pro ventilátory MEDUMAT.

- Slouží pro usazení MEDUMAT Standard, MEDUMAT Standard a, MEDUMAT Basic, MEDUMAT Basic p.
- Lze připevnit na zeď či strop, nebo na stěnu či střechu uvnitř vozidla.

1.2 Funkce

Držák STATION MEDUMAT je určen pro usazení ventilátorů MEDUMAT Standard/Basic. Systém umožňuje snadné vkládání a snímání ventilátorů MEDUMAT.

Přenosný držák STATION MEDUMAT lze během transportu pacienta zavěsit na nosítka či postel a zajistit pásky na suchý zip.

Popruh či madlo umožňuje pohodlný přenos držáku s ventilátorem MEDUMAT.

Držák na stěnu STATION MEDUMAT je určen pro pevnou instalaci.

2 BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

Pro Vaši vlastní bezpečnost a dle požadavků normy 93/42/EEC dodržujte prosím následující pokyny:

- Přečtěte si pozorně návod k použití, který je součástí přístroje a musí být kdykoliv k dispozici.
- K jednotlivým přístrojům, které jsou v držáku STATION MEDUMAT usazeny, jsou přiloženy samostatné návody k použití. Dbejte i na tyto návody a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v nich.
- Držák STATION MEDUMAT či ventilátory MEDUMAT může používat pouze osoba s medicínským vzděláním, která byla zaškolená na práci s dýchací nebo odsávací technikou. Nesprávné použití může způsobit těžké poškození zdraví.
- Pro prevenci před infekční či bakteriální kontaminací věnujte pozornost kapitole 5 *Hygienická údržba*.
- Držák STATION MEDUMAT používejte pouze k určeným účelům (viz kapitola 1.1 *Použití*).
- Veškeré inspekce a opravy nechte provádět u výrobce, společnosti Weinmann, nebo kvalifikovanou osobou.

- Pokud nahradíte příslušenství nebo náhradní díly doporučené v návodu neoriginálními výrobky, může dojít k omezení funkce nebo biokompatibility. V tomto případě, kdy jsou používány součástky jiné než originální nebo uvedené v návodu, zaniká veškerý nárok na uplatnění záruky a právní odpovědnost.


3 MONTÁŽ

Držák na stěnu STATION MEDUMAT WM 22550 je přišroubován na vhodné místo, například na stěnu sanitního vozu nebo střešní panel v sanitním voze.


1. Vyberte vhodné místo pro montáž držáku.
2. Vyznačte všechny 4 body na stěnu, kde bude držák namontován.
3. Pomocí vrtáku 3mm vyvrtejte díry.
4. Přišroubujte držák přiloženými šrouby.

Upozornění


Místo, na které je držák STATION MEDUMAT namontován, musí být dostatečně pevné, aby uneslo držák s ventilátorem MEDUMAT.

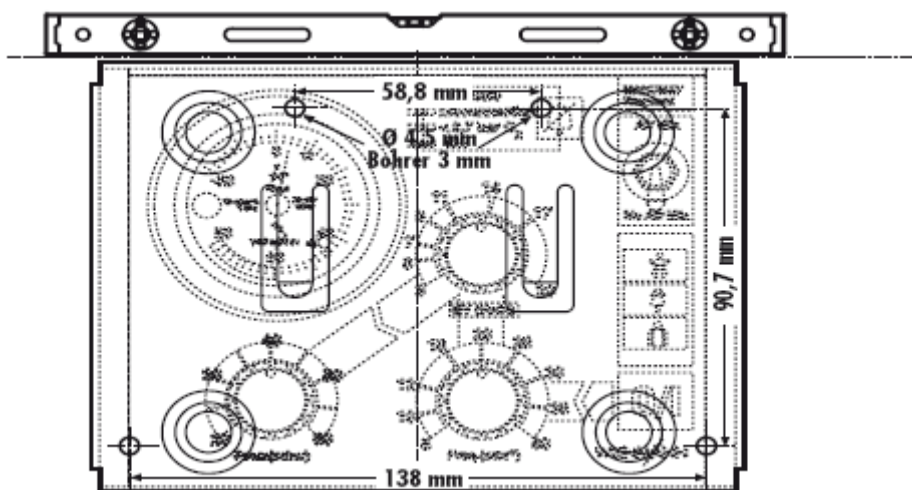


4 OBSLUHA

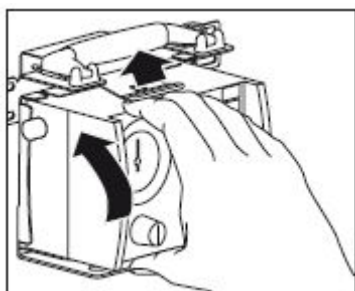


1. Pro vložení ventilátoru MEDUMAT nejprve zapřete spodní hranu přístroje do držáku. Poté zatlačte na horní část ventilátoru dokud nezapadne do držáku.

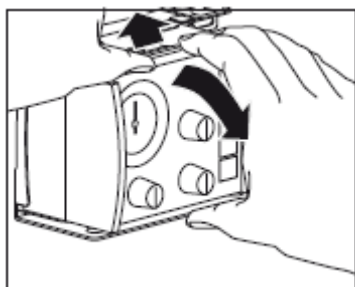

2. Pokud chcete přístroj vyjmout, uchopte jej za spodní i horní část. Palcem druhé ruky odjistěte směrem nahoru pojistku a současně vytáhněte nejprve horní část ventilátoru, poté spodní.

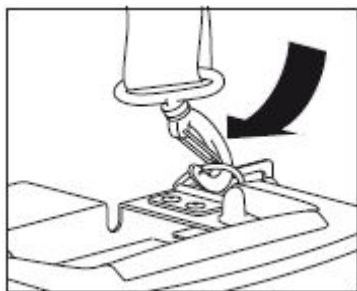

3. U přenosného držáku STATION MEDUMAT přicvakněte karabiny popruhu na kroužky na horní straně držáku.

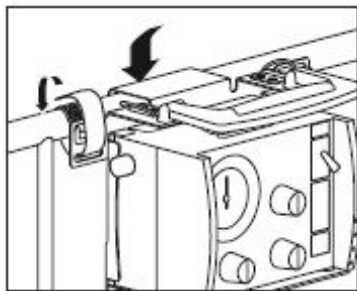

4. Zavěste přenosný držák STATION MEDUMAT na nosítka či postel (průměr lišty 10mm – 45mm). Jako prevenci před spadnutím během transportu, zajistěte držák pomocí pásků na suchý zip.

5 HYGIENICKÁ ÚDRŽBA

Držák STATION MEDUPAM dezinfikujte otřením. Při dezinfekci dodržujte návod k použití dezinfekčního prostředku. Doporučujeme TERRALIN.

Při desinfekci doporučujeme používat vhodné rukavice (běžné domácí gumové či jednorázové).

6 KONTROLA FUNKCE

Funkčnost přenosného držáku STATION MEDUMAT WM 22950 a držáku na stěnu STATION MEDUMAT WM 22550 musí být kontrolována před každým použitím, nejméně však každých 6 měsíců.

6.1 Kontrola západky

1. Vložte MEDUMAT Standard/Basic do držáku STATION MEDUMAT.
2. Zkontrolujte, zda je MEDUMAT v držáku bezpečně uchycen.
3. Ventilátor a držák musejí být v pevném spojení, ventilátor nesmí z držáku vypadnout.

6.2 Kontrola upevnění na nosítka/postel

1. Zavěste přenosný držák STATION MEDUMAT na nosítka či postel.
2. Zajistěte držák pomocí pásků na suchý zip (viz kapitola 4 *Obsluha*)
Pásky musí pevně držet, nesmí se sami povolovat.


7 ÚDRŽBA

Držák STATION MEDUMAT nevyžaduje žádnou speciální údržbu. Přesto je nutné dodržovat pravidelné kontroly funkce (viz kapitola 6 *Kontrola funkce*)

8 LIKVIDACE

Přístroj nelikvidujte společně s komunálním odpadem, ale likvidaci konzultujte s autorizovanou společností, zabývající se likvidací odpadu.

9 OPRAVY

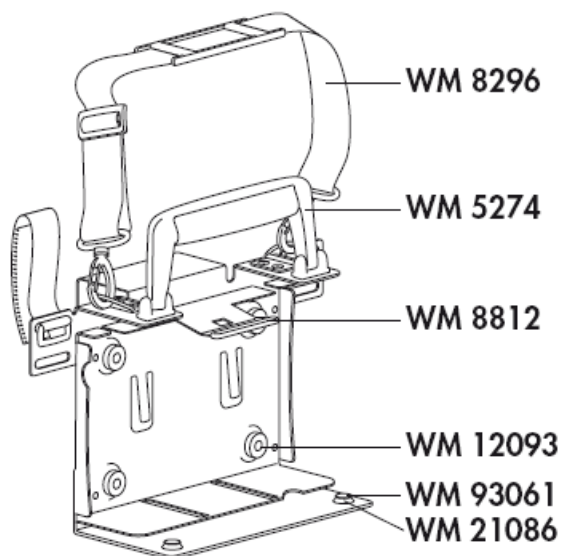

Sami můžete provést následující opravy držáku STATION MEDUMAT:

Výměna madla, WM 5274

1. Odšroubujte dva šrouby připevňující madlo. Na jeden šroub připadají dvě podložky.
2. Vyjměte staré madlo a místo něho nasadte nové.
3. Nové madlo připevněte přiloženými šrouby.

Výměna plastové hlavice, WM 8812

1. Stáhněte uvolněnou plastovou hlavici z pojistky.
2. Do nové plastové hlavice aplikujte trochu lepidla. Doporučujeme Loctite 601.
3. Nasuňte novou plastovou hlavici na pojistku.

10 ROZSAH DODÁVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

10.1 Rozsah dodávky

1 Přenosný držák STATION MEDUMAT, kompletní	WM 22950
skládá se z:	
- přenosný držák STATION MEDUMAT s madlem a pásky na suchý zip	
- popruh na rameno	WM 8296
- návod k použití	WM 16788
2 Držák na stěnu STATION MEDUMAT, kompletní	WM 22550
skládá se z:	
- držák na stěnu STATION MEDUMAT	
- návod k obsluze	WM 16778

10.2 Náhradní díly

1	Madlo včetně montážních prvků	WM 15145
2	Ramenní popruh	WM 8296
3	Plastová hlavice	WM 8812
4	Gumová podložka	WM 21086
5	Zarážka	WM 93061
6	Průchodka	WM 12093
7	Pásek na suchý zip	WM 22959
8	Návod k použití, DE	WM 16778
9	Návod k použití, EN, FR, NL	WM 16791

11 TECHNICKÉ ÚDAJE

	Přenosný držák STATION MEDUMAT
Třída produktu dle normy 93/42/EEC	I
Splňuje normu	EN 1789
Rozměry (Š x V x H)	231 x 160 x 155 mm
Přípustný průměr lišty pro zavěšení	10 mm – 45 mm
Hmotnost	0.69 kg prázdná nebo 2 kg s MEDUMAT
Teplotní rozsah	
- provozní teplota	-18°C až + 60°C
- skladovací teplota	-40°C až +70°C

	Držák na stěnu STATION MEDUMAT
Třída produktu dle normy 93/42/EEC	I
Splňuje normu	EN 1789
Rozměry (Š x V x H)	156 x 113 x 44 mm
Hmotnost	0.24 kg prázdná nebo 1,4 kg s MEDUMAT
Teplotní rozsah	
- provozní teplota	-18°C až + 60°C
- skladovací teplota	-40°C až +70°C



11 ZÁRUKA

- Výrobce Weinmann poskytuje záruku na závady, které jsou způsobeny chybou materiálu nebo ve výrobě, po dobu dvou let od data zakoupení. U produktů, jejichž životnost je prokazatelně nižší než dva roky, platí záruční lhůta uvedená v uživatelské příručce daného produktu.
- Záruka není poskytnuta:
 - pokud nebyly dodrženy instrukce dle návodu;
 - chyba byla v obsluze přístroje;
 - při nesprávném použití či nesprávné manipulaci;
 - při neoprávněném zákroku neautorizovanou osobou za účelem opravy přístroje;
 - při nepředvídatelných okolnostech (např. blesk, apod.);
 - při poškození během transportu v nevhodném obalu;
 - pokud nebyla dodržována pravidelná údržba a servis;
 - na opotřebované a poškozené komponenty jako např. filtry, baterie, předměty na jedno použití, apod.;
 - pokud nebyly používány pouze originální součástky.
- Výrobce neručí za nepřímé škody v souvislosti s vadami, pokud vznikly v důsledku úmyslného jednání či hrubé nedbalosti, nebo při poškození zdraví v důsledku nedbalosti.
- Výrobce si rezervuje právo na rozhodnutí o odstranění vad, dodání nových věcí či snížení nákupní ceny na přiměřenou částku.
- Pokud výrobce odmítne reklamaci, nehradí náklady za přepravu mezi zákazníkem a výrobcem.
- Zákonné záruční požadavky zůstávají nedotčeny.

Adresa výrobce:

Weinmann

Geräte für Medizin GmbH+Co. KG
P.O. Box 54 02 68, D-22502 Hamburg

Tel.: +49 / 40 / 5 47 02-0
Fax: +49 / 40 / 54 70 24 61
E-mail: int.sales@weinmann.de
www.weinmann.de

Autorizovaný zástupce pro Českou republiku:

MEDIPRAX CB s.r.o.

Branišovská 31, 370 05 České Budějovice

Tel.+fax: +420 385 310 382, +420 385 310 396
E-mail: mediprax@mediprax.cz
www.mediprax.cz